



REINIGUNG UND DESINFEKTION

B. Braun SpaceStation und B. Braun Perfusor® / Infusomat® Space

B. Braun SpaceStation

Reinigung und Desinfektion



Vor Reinigung und Desinfektion der SpaceStation müssen alle elektronischen Anschlüsse und EDV-Verbindungen von der Stromversorgung getrennt werden.



Prüfen Sie die SpaceStation auf sichtbare Verunreinigungen und wischen Sie diese mit einem gebrauchsfertigen, zugelassenen Desinfektionstuch ab. Entsorgen Sie das Tuch nach Gebrauch.

Wir empfehlen: Die vorgetränkten Meliseptol® Wipes sensitive Tücher.



Bei stärkerer Verunreinigung entfernen Sie die Abdeckung, entriegeln die Sperrtaste und nehmen das SpaceCover ab. Entfernen Sie sichtbare Verunreinigungen auf dem SpaceCover und der Führungsschiene wie oben beschrieben. Entsorgen Sie das Tuch nach Gebrauch.

Wiederholen Sie den Reinigungs- und Desinfektionsschritt, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die Einwirkzeit von Meliseptol® Wipes sensitive beträgt 1 Min. Während dieser Zeit muss die Fläche feucht bleiben.

In die Lüftung und Anschlüsse darf keine Flüssigkeit gelangen. Setzen Sie das SpaceCover erst nach vollständiger Trocknung des Desinfektionsmittels ein und verriegeln Sie es.

Dann kann die saubere, trockene und desinfizierte Pumpe wieder in die Station eingelegt werden. Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen.



B. Braun Perfusor® / Infusomat® Space

Reinigung und Desinfektion



Vor Reinigung und Desinfektion müssen alle elektronischen Anschlüsse von der Stromversorgung getrennt werden.



Reinigen und desinfizieren Sie die Space-Infusionspumpe, beginnen Sie dabei mit dem Display und verwenden Sie ein gebrauchsfertiges, zugelassenes Desinfektionstuch. Entsorgen Sie das Tuch nach Gebrauch.

Wir empfehlen: Die vorgetränkten Meliseptol® Wipes sensitive Tücher.



Zur Reinigung des flexiblen Kabels des Infusomat® Space und des Perfusor® Space empfehlen wir Meliseptol® Wipes sensitive.



In die Lüftung und Anschlüsse darf keine Flüssigkeit gelangen. Setzen Sie die Space-Pumpe erst nach vollständiger Trocknung des Desinfektionsmittels wieder in die Station / die Halterung ein (siehe Reinigungsplan der SpaceStation). Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

B. Braun SpaceStation und B. Braun Perfusor® / Infusomat® Space

Um die Patientensicherheit und die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten, reinigen und desinfizieren Sie das Gerät immer dann, wenn es verunreinigt ist oder im Rahmen einer Therapie zum Einsatz gekommen ist.

HINWEIS

- Zur Reinigung und Desinfektion empfehlen wir Meliseptol® Wipes sensitive.
- Bei stärkeren Verunreinigungen, die sich mit der oben beschriebenen Methode nicht entfernen lassen, wenden Sie sich bitte an den medizintechnischen Dienst Ihrer Klinik.
- Die geltenden Hygienepläne und -massnahmen der Klinik sind zu beachten.
- Lesen Sie vor Verwendung die Gebrauchsanweisung.

PACKUNGSGRÖSSEN UND HALTBARKEIT

Meliseptol® Wipes sensitive	Art.-Nr.	Haltbarkeit	Abmessungen	Wipes
Spenderbox	19582	2 Jahre	15.2 cm x 20 cm	60 Stück
Nachfüllpackung	19530	2 Jahre	15.2 cm x 20 cm	60 Stück
100 Flowpack	19894	2 Jahre	18 cm x 20 cm	100 Stück
XL Flowpack	19893	2 Jahre	24 cm x 30 cm	42 Stück

