

Prontovet® Wundspüllösung / Prontovet Wound Gel

Zusammensetzung Prontovet® Wundspüllösung: Aqua pruficata, 0,1% Undecylenamidopropylbetain, 0,1% Polyaminopropyl Biguanide (Polyhexa- nide); Aussehen und Geruch: klare, farb- und nahezu geruchlose wässrige Lösung. Zusammensetzung Prontovet® Wound Gel: Aqua ad injectabilia, Glycerol, Hydroxyethylcellulose, 0,1% Undecylenamidopropylbetain, 0,1% Polyaminopropyl Biguanide (Polyhexa- nide), Aussehen und Geruch: klares, farb- und geruchloses wässriges fettfreies Gel. Produktprofil und Einsatzgebiete: Reinigung und Befeuchtung von chronischen Hautwunden, konservierende Befeuchtung von Verbänden und Wundauflagen wie Kompressen, Gazen, Kissen, Schwämmen, Gelen, Hydrofasern, Alginaten, Hydrokolloiden u.ä.m., beim Verbandswechsel zum Lösen verkrusteter Verbände und anderer verkrusteter Wundauflagen. Die Anwendung ist schmerzfrei und wird auch von Allergikern gut vertragen. Unangenehmer Wundgeruch wird schnell beseitigt. Gewebeverträglichkeit und Biokompatibilität: nicht zytotoxisch, nicht reizend, nicht irritierend, nicht sensibilisierend, schmerzfrei, keine Hemmung der Granulation und Epithelisierung, dermatologisch als unbedenklich bewertet. In der mehrojährigen klinischen Anwendung konnte die sehr gute Gewebeverträglichkeit von Polihexanid und Undecylenamidopropylbetain auch bei Patienten mit extrem ausgebildeten chronischen Wunden belegt werden. Nebenwirkungen Prontovet® Wundspüllösung: bisher nicht beobachtet; bei Prontovet® Wound Gel kann in sehr seltenen Fällen direkt nach dem Auftragen ein leichtes Brennen auf der Wundoberfläche auftreten, welches jedoch nach wenigen Minuten wieder verschwindet. Gegenanzeigen: Da Allergien nie auszuschließen sind, sollte Prontovet® Wundspüllösung / Prontovet Wound Gel bei bekannten Allergien oder bei Allergieverdacht auf einen der Inhaltsstoffe nicht eingesetzt werden. Nicht anwenden bei hyalinem Knorpel. Nicht verwenden in Kombination mit anionischen Tensiden, da diese die Konservierung beeinträchtigen können. Prontovet® Wundspüllösung / Prontovet Wound Gel darf auch nicht mit anderen wundreinigenden Seifen, Salben, Ölen oder Enzymen u.ä. vermischt werden. Bei der Entfernung solcher Substanzen aus der Wunde ist sicherzustellen, dass diese vollständig mit Prontovet® Wundspüllösung aus der Wunde herausgespült werden. Allgemeine Sicherheitshinweise: Nur zur äußerlichen Anwendung bei Haut und Wunden. Nicht zur Infusion oder Injektion anwenden! Nicht einnehmen. Nur einwandfreie und unbeschädigte Gebinde verwenden. Flaschen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor Kindern sicher aufbewahren!

Hersteller:

B. Braun Medical AG,
CH-6204 Sempach