

DEVILBISS SAUERSTOFFKONZENTRATOR - SERVICE- UND WARTUNGSPROTOKOLL



HINWEIS – Wir empfehlen autorisierten Drive DeVilbiss Fachhändlern die Verwendung dieses Service- und Wartungsprotokolls.

Modellnummer _____ Seriennummer _____

ERSTINSPEKTION

1. Nach Erhalt das Gerät auf externe Schäden überprüfen.
2. Verifizieren, dass der Ansaugfilter und der Gehäuseluftfilter angebracht sind.
3. Den Netzstecker in eine Steckdose einstecken, einschalten und die Warntöne/visuellen Alarme überprüfen.
4. Den Durchflussmesser auf die maximal empfohlene Durchflussrate stellen und das Gerät 20 Minuten laufen lassen. Der interne Sauerstoffsensor überwacht die Sauerstoffreinheit. Wenn der Sauerstoff die Spezifikationen erfüllt, leuchtet die grüne Kontrollleuchte für normale Sauerstoffversorgung. Wenn die gelbe Kontrollleuchte für geringe Sauerstoffversorgung leuchtet, das Wartungshandbuch zurate ziehen oder DeVilbiss für Unterstützung kontaktieren.
5. Das eingeschaltete Gerät von der Stromversorgung trennen, um die Stromausfallwarnung zu prüfen.

WARTUNG ZWISCHEN EINSÄTZEN BEI PATIENTEN

Bei einem Wechsel des Patienten muss das Gerät zum Schutz des Benutzers vor einem Wiedereinsatz hygienisch aufbereitet werden. Diese hygienische Aufbereitung darf nur vom Hersteller oder vom autorisierten Fachhandel vorgenommen werden.

DeVilbiss Healthcare empfiehlt zwischen Einsätzen beim Patienten mindestens die folgenden Wartungsmaßnahmen durchzuführen. Wenn zudem die regelmäßige Wartung durch den Versorger fällig ist, sind diese Maßnahmen zusätzlich zur unten angegebenen Liste durchzuführen.

1. Sauerstoffschlauch, Kanüle/Maske, Sauerstoffauslassanschluss und Sprudelbefeuchter entsorgen.
2. Den Gehäuseluftfilter ersetzen.
3. Führen Sie nun eine Oberflächen-Wischdesinfektion des Gerätes durch.
4. Alle Stecker, Kabel und Komponenten überprüfen. Alle beschädigten oder abgenutzten Komponenten austauschen.
5. Die Sauerstoffkonzentration überprüfen. Wenn das Gerät innerhalb der Spezifikation liegt, braucht der Long-Life Bakterienfilter zwischen verschiedenen Patienten nicht ersetzt zu werden. Wenn die Konzentration außerhalb der Spezifikation liegt, siehe Abschnitt Fehlersuche.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

1. Sauerstoffschlauch, Kanüle/Maske und Sprudelbefeuchter (falls verwendet) gemäß Herstellerangaben reinigen oder ersetzen.
2. Gehäuseluftfilter - wöchentlich reinigen

EMPFOHLENE WARTUNGSINTERVALLE

Die Wartung in dem Intervall ausführen, das für jedes Modell in der folgenden Tabelle mit den Wartungsintervallen angegeben ist. Wir empfehlen, das angehängte Wartungsprotokoll für Ihre Eintragungen zu verwenden.

1. Stunden aufzeichnen
2. Überprüfung der Sauerstoffkonzentration mit einem Sauerstoffmessgerät. Messergebnis in die Tabelle eintragen.
3. Bei jeder Wartung den akustischen Alarm und die Kontrollleuchten überprüfen.
4. Die Filter prüfen und erforderlichenfalls ersetzen

Dieser Wartungsplan setzt typische Wohnbedingungen voraus und geht von Folgendem aus:

- Annahme einer Nutzung von 5.000 Stunden in einem Jahr
- Ein normales, sauberes Betriebsumfeld
- Standardwartungsintervalle werden unten notiert. Wartungsintervalle können mehr oder weniger häufig als unten angegeben sein, mit der Maßgabe, dass der Versorger angemessene Protokolle aufstellt und dokumentiert.

DeVilbiss Sauerstoffkonzentrator - Empfohlene Wartungsintervalle						
Modell	Sauerstoffkonzentration	Kompressorfilter	Bakterienfilter	Gehäusefilter	Long-Life Filter	
Serie 306	3 Jahre	Nicht zutreffend	Alle 6 Jahre überprüfen. Tauschen Sie ihn ggf. aus.	Bei jeder Inspektion waschen. Tauschen Sie ihn ggf. aus.	Alle 3 Jahre überprüfen. Tauschen Sie ihn ggf. aus.	
Serie 525	3 Jahre	In Verbindung mit der Kompressorwartung überprüfen. Tauschen Sie ihn ggf. aus.	In Verbindung mit der Kompressorwartung überprüfen. Tauschen Sie ihn ggf. aus.		Bei jeder Inspektion waschen. Tauschen Sie ihn ggf. aus.	Während der Prüfungen bei der Präventivwartung überprüfen. Tauschen Sie ihn ggf. aus.
1025 Series	3 Jahre					
515DS/515KS	2 Jahre					
515DZ/515KZ	6-12 Monate	Nicht zutreffend				
515ADS/515AKS	2 Jahre					
515ADZ/515AKZ	6-12 Monate					

Informationen zum Service- und Wartungsprotokoll sind auf der nächsten Seite zu finden.

Für technische Unterstützung folgende Telefonnummern anrufen:

USA/Puerto Rico (800) 338-1988 • Europa +49 (0) 621-178-98-0 • International (814) 443-4881

DATUM	STUNDEN	% O₂	ALARMTEST	SONSTIGE (Filter, durchgeführte Arbeit, Anmerkungen)
Erstinspektion				
Prüfungen bei der Präventivwartung				

DeVilbiss Healthcare LLC • 100 DeVilbiss Drive • Somerset, PA 15501-2125 • USA • 800-338-1988 • 814-443-4881



DeVilbiss Healthcare GmbH • Kamenzer Straße 3 • 68309 Mannheim • DEUTSCHLAND • +49 (0) 621-178-98-0

DeVilbiss® ist eine eingetragene Marke von DeVilbiss Healthcare.
© 2018 DeVilbiss Healthcare LLC. 03.18 Alle Rechte vorbehalten.