


21. MACH OP-LEUCHTEN

Mach LED 130, Mach 130F, Mach 130, Uniflex R96

Umbau auf sterilisierbaren Handgriff

21 Umbau auf sterilisierbaren Handgriff_d

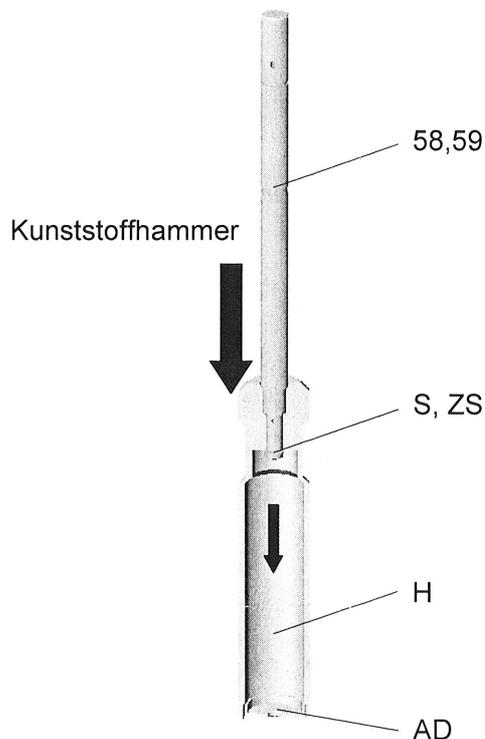


Lieferumfang:

- sterilisierbare Griffhülse
- Kupplung
- eine Schraube M4x35 DIN 912:A2 mit Sicherungslack

Beim Umbau auf sterilisierbaren Handgriff wie folgt vorgehen:

- **Leuchte stromlos schalten!**
- Abdeckung AD mit einem Schraubendreher entfernen.
- Schraube S M4x6 DIN 7985 mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen.
- Schraube S M4x6 DIN 7985 und die Zahnscheibe ZS Ø4,3 DIN 6797 herausnehmen.
- Dabei den Handgriff festhalten, um das Leuchtengehäuse nicht zu beschädigen.
- Handgriff H entfernen.
Dabei von oben in Pfeilrichtung mit einem Kunststoffhammer auf den Handgriff klopfen.

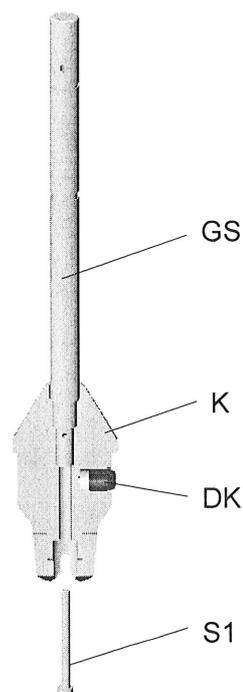

- Kupplung K auf die Griffstange GS setzen.
- Kupplung K mit der Schraube S1 M4x35 DIN 912:A2 mit Sicherungslack befestigen.
- Die sterilisierbare Griffhülse auf die Kupplung K schieben, so daß sie durch den Druckknopf DK gesichert ist.