

Bedienungs- und Wartungsanleitung für indulab-vet OP- und Behandlungstische

indulab-vet OP- und Behandlungstische mit Vetlift-Hubsäulen

Wartung & Reinigung

indulab-vet OP- und Behandlungstische mit Vetlift-Hubsäulen sind grundsätzlich wartungsfrei.


Die Tische können mit herkömmlichen Reinigungsmitteln feucht gereinigt werden. Bitte verwenden Sie jedoch kein abrasives (grobkörniges) Mittel. Dieses könnte Kratzer auf den Oberflächen der Tische verursachen. Zur Desinfektion können handelsübliche Mittel verwendet werden.

Bedienung mechanische Kipp-Vorrichtung




Die Bedienungsseite des Tisches ist auf der Seite des Fusschalters. Um die Tischplatte festzustellen drücken Sie den Bedienungshebel nach hinten. Für den Kippvorgang ziehen Sie den Bedienungshebel nach vorn. Die Tischplatte kann im gewünschten Neigungswinkel positioniert und festgestellt werden. Der Bedienungshebel ist in Achsrichtung des Klemmgewindes ausrückbar und kann dadurch jederzeit verstellt werden.

Bedienung Dreh-Kippvorrichtung

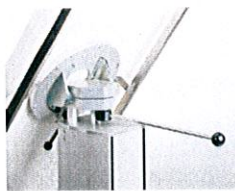

Der Grosse Bedienungshebel rechts ist für die Kippvorrichtung, und der kleine Hebel links ist für die Drehvorrichtung angebracht. Die Bedienung der Kippvorrichtung ist oben beschrieben. Um die Drehvorrichtung zu lösen drücken Sie den kleinen Hebel nach hinten. Die Tischplatte kann nun nach Belieben gedreht werden. Um die Tischplatte festzustellen ziehen Sie den kleinen Hebel nach vorn. Beide Hebel sind in Achsrichtung des Klemmgewindes ausrückbar und können dadurch jederzeit verstellt werden.

Bedienung Fusschalter

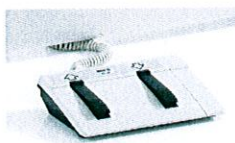

Der linke Schalter dient zur Höhenverstellung nach oben, der rechte Schalter zur Höhenverstellung nach unten.

Akku-Pack laden

Wenn sich der Akku fast entleert hat, ertönt ein akustisches Signal. Mitgeliefertes Ladekabel an 230VAC Steckdose anschließen. Ladezeit mindestens 8-14 Stunden. Wenn die Kontrolllampe am Ladegerät von orange auf grün wechselt ist der Akku geladen.

Reinigung: gilt für den ganzen OP-Tisch: nur feucht abwischen, (eventuell mit mildem Reinigungsmittel) keine scheuernde Reinigungsmittel verwenden!

