




Tipps & Tricks zur Anwendung

ThermoSafepet®




ThermaSafePet®

Vorbereitung:

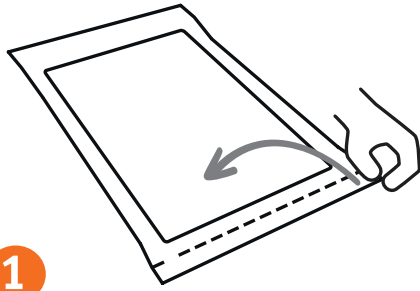


1

Öffnen Sie die Verpackung unten an der Aufreißblase und entnehmen Sie die **ThermaSafe Pet** Wärmdecke.

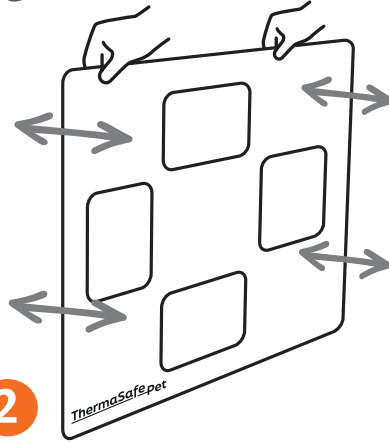

2


Schütteln Sie die **ThermaSafe Pet** Wärmdecke kurz aus, um die Wärmereaktion zu aktivieren.

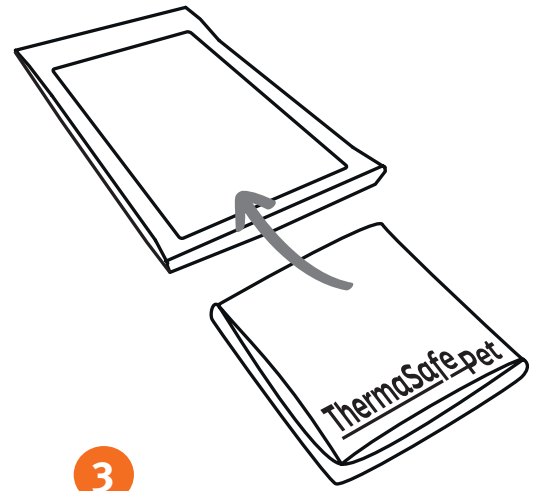

3


Für eine zügige Erwärmung falten Sie die **ThermaSafe Pet** Wärmdecke wieder zusammen und belassen diese für ca. 10-20 Minuten in der geöffneten Verpackung. Danach ist die Decke einsatzbereit.

Anwendung:

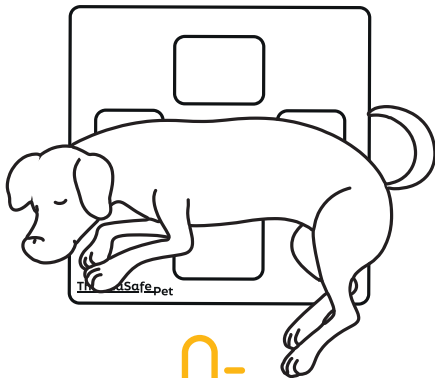


A

Für mäßige Wärmezufuhr legen Sie Ihren Patienten auf die **ThermaSafe Pet** Wärmdecke.

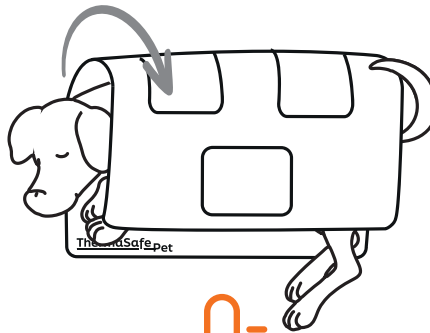

B

Für mittlere Wärmezufuhr decken Sie Ihren Patienten mit der **ThermaSafe Pet** Wärmdecke ab.

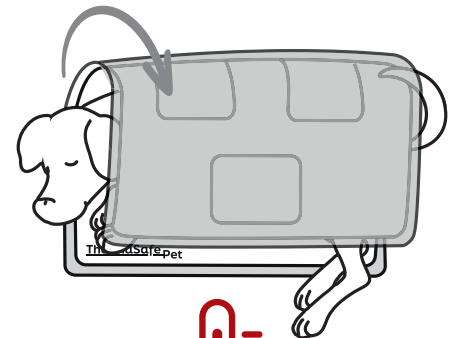

C

Für hohe Wärmezufuhr verwenden Sie zusätzlich ein oder mehrere Lagen Viscose oder eine Decke über der **ThermaSafe Pet** Wärmdecke.



Funktionsweise:

ThermaSafe Pet erwärmen sich durch eine exotherme Reaktion mit Luftsauerstoff. Da die Reaktion mit einer geringen Toleranz abläuft, wird stets eine gleichbleibende Wärmemenge erzeugt.

Dies bedeutet, dass Sie durch wärmestauende Maßnahmen die Temperatur der Decke und dadurch den Wärmeeffekt steuern können.

Beachten Sie auch unbedingt den kumulativen Effekt durch die Wärmeabgabe Ihres Patienten.

Hinweise:

Die Wärmepads sind so designed, dass Verbrennungen Ihres Patienten ausgeschlossen sind.

Das Austreten des Inhalts der Wärmepads bei versehentlichem Öffnen durch Ihren Patienten ist vollkommen unbedenklich.

ThermaSafe Pet halten zuverlässig die Wärme für mindestens 12 Stunden.

Nicht in der Mikrowelle erhitzen!



www.VetShop.de

