



INFORMATIONEN

über die Verwendung der Gesichtsschutzschilde

1. Der Gesichtsschutzschild ist kein medizinisches Produkt. Der Gesichtsschutzschild beschränkt den Kontakt mit krankheitsregenden Mikroorganismen, unterbindet diesen aber nicht und bietet somit keinen vollständigen Ansteckungsschutz.
2. Der Gesichtsschutzschild ist mehrfach verwendbar. Die farblose Scheibe ist regelmäßig mit Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis zu reinigen.
3. **Vor dem ersten Gebrauch ist die Schutzfolie auf beiden Seiten des Kunststoffes zu beseitigen.** [Achtung! Auf der einen Seite ist die Folie farblos und schwer erkennbar; auch sie muss entfernt werden.]
4. Vor jedem Gebrauch ist die Scheibe mit einem weichen Lappen, der mit einer Desinfektionsflüssigkeit getränkt wird, abzuwischen. Zusätzlich kann die Scheibe z. B. mit einem Scheibenputzmittel gesäubert werden. Während der Reinigung und der Benutzung ist darauf zu achten, dass der Kunststoff, aus dem der Gesichtsschutzschild besteht, nicht zerkratzt wird.
5. Das Befestigungsband für den Gesichtsschutzschild sollte so durch die vorhandenen Öffnungen geführt werden, dass es nach dem Anlegen der Maske die Stirn berührt.
6. Das Band ist mit einem Schwamm, der mit einer Desinfektionsflüssigkeit getränkt wird, zu reinigen oder mit der Hand in warmem Wasser mit Seife zu waschen.
7. **Für Transportzwecke wird der Gesichtsschutzschild flach geliefert. Beim Aufsetzen des Gesichtsschutzschields ist das Klettverschlussband am Hinterkopf zu verschließen. Dabei ist die Spannung des Bands dem Kopfumfang anzupassen und die Position des Schutzschields im Verhältnis zum Band zu regulieren (damit eine Bogenform entsteht). Der Kunststoff darf das Gesicht nicht berühren, so dass eine ungehinderte Atmung gewährleistet ist.**
8. Übermäßiges Beugen und Anspannen des Gesichtsschutzschildes kann ihn beschädigen und sogar das Entstehen von Risse verursachen. Für den unachtsamen Umgang mit dem Produkt übernimmt der Hersteller keine Haftung.
9. Langes Tragen des Gesichtsschutzschields kann ein Schwitzen der Haut an den Berührungspunkten mit dem Band und im Falle empfindlicher Haut Hautreizungen auslösen.
10. Besondere Vorsicht wird bei der Verwendung des Gesichtsschutzschields durch Personen mit Sehfehlern oder neurologischen Erkrankungen, die durch Lichtreflexe aktiviert werden (u. a. Epilepsie), empfohlen.
11. Der Gesichtsschutzschild darf nicht während des Betriebs und der Bedienung von Maschinen oder des Führens von Fahrzeugen benutzt werden.
12. Der Gesichtsschutzschild ist weder schlagfest noch widersteht er anderen mechanischen Beschädigungen.
13. Das Produkt besitzt keine Atteste oder Zertifikate.

ACHTUNG!

Entferne die Schutzfolie
von beiden Seiten
des Schutzvisiers!

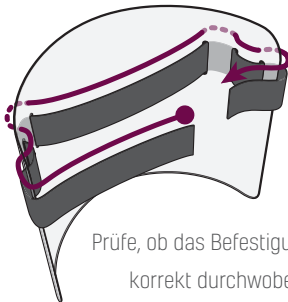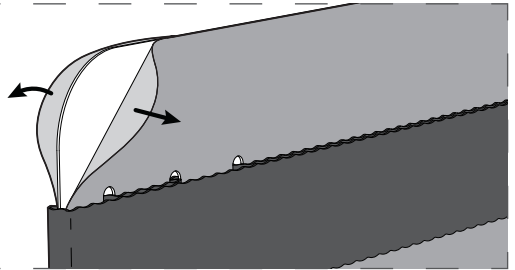

Prüfe, ob das Befestigungsband
korrekt durchgewoben wurde.

Forme das Schutzvisier
in einen Bogen,
dass nach
dem Aufsetzen
der Stoff sich
im ausreichenden
Abstand vom
Gesicht befindet
und bei der Atmung
nicht stört.

